

 Österbottens välfärdsområde Pohjanmaan hyvinvointialue	Dokumenttyp ANVISNING FÖR PROFESSIONELLA		Sida 1 (3)
Namn DE VANLIGASTE VENKANYLKORKAR, SAMT SPOLNING OCH DESINFEKTION AV DEM	Förberedd av: Hygienskötare/ Kvalitet och tillsyn Datum: 20.12.2023	Godkänd: Camilla Koivisto och Silvia Grönroos-Pada Datum: 20.12.23	Uppdaterad: Enhetens namn Datum:
Injektionsventiler och korkar förhindras luftemboli via kanylen, förhindrar blödning och förebygger infektioner. Byts alltid då korken är borttagen från kateter/kanyl, efter blod/ blodpreparattransfusion eller parenteral nutrition och då tillverkarens rekommendation för användningstiden har gått ut (vanligen: max 1 vecka).			
Q-syte - Split-septum injektionsventil med direkt utflöde, inga inre delar - Korken har negativt tryck (samlar vätska, blod, medicin i sig) - Luerlock - Användning: korta perifera kanyler (ej Midline) - Fästes alltid med 3-vägskranens lumen - Desinficeras alltid före användningen - Bytesmellanrum 6 dygn - Lagervara: V20345 01100, pris: 0,50€/st - Som lagervara finns även slangmodell med förlängning med 2 grenar, längden 15 cm - Lagervara: V2034 3110, pris: 1,75€/st	 Bild: Q-syte		
MicroClave Clear - Neutral injektionsventil - Användning: perifera kanyler (också Midline) samt central venkateter (också PICC) - Luerlock - Fästes alltid med en 3-vägskrans lumen - Desinficeras - Bytesmellanrum 7 dygn - Lagervara: VBA0010059, pris: 0,47€/st	 Bild: MicroClave Clear		
Skyddskork - Steril luerlock "stoppare" - Användning: bland annat för att skydda och stänga kanyler, förlängningsslangar, infusionsslangar, kranar och sprutor - Lagervara: V203451053, pris: 0,032€/st	 Bild: Luerlock "stoppare"		

Perifera kanyler utan medicinlucka -Anslut alltid en 3-vägskran till slangen samt ventilkork till kanylen så att medicindoseringen är möjligt vid behov -I urvalen finns säkerhetskanyler -VCS operationsavdelning samt akutverksamhet använder fortfarande kanyler med medicinlucka -Prehospital akutsjukvård använder sk. Integrerade kanyler, vilka har färdigt 3-vägskran (Nexiva ®) -Olika perifera kanylmodeller och -storlekar hittas och kan beställas via Fiori-lagervara-programmet.	   Bild: Periferisk iv-kanyl utan medicinlucka och 3-vägskran med slangen som anslutes ihop samt Q-syte
Desinfektion/ rengöring av ventilkorkarna -Rengöring: 15 sekunder +torkningstid 10 sekunder! Obs! Synlig sekret/blod rengörs med sterilt NaCl 0.9% före desinfektion. A12t Dilutus lösning -Etanol 80% -Etanol på kompress: hud, korkar, ventiler, portar (lumen) samt ytor och apparat -500 ml (samt 1000 ml) -Apoteksvara:13221124, pris: 1.15€/ 500 ml Apowipe iv-port disinfection dukar -Etanol 80% -Hud, korkar, ventiler, portar -Storlek: 5x6 cm (12x18 cm) -Skilt förpackad, steril -200 st/paket -Apoteksvara: 021871, pris: 0.42€/st	  Bild: A12t och Apowipe kanylduk (80% alkohol) samt NaCl 0.9%
Desinficerande skyddskork Swabcap -Isopropylalkohol 70% desinfektionskork -Vrids fast med sk. "non –touch –metod" -Fästes på en perifer kanyls injektionsventil tex. Q-syte, ej direkt med kanylen! -Desinfektionstid 30 sekunder -Alltid engångs, borttagen kork får inte sättas tillbaka	

-Max användningstid 7 dygn -200 st/ paket -lagervara: VTF0010031, pris: 0.20€/st	 Bild: Swabcap desinficerande kork
Desinficerande skyddskork Curos Stopper (3M) -70% isopropanol desinfektionskork -Desinficerande luerlock skyddskork i stället för steril skyddskork -Vrids lätt fast på en 3-vägskran eller kopplingens distala lumen, ej direkt till kateter eller perifer kanyl -Korkens struktur upprätthåller trycket samt är ett slutet system -Desinfektionstid 1 minut -Alltid engångs, borttagen kork får ej fästas på nytt -Max användningstid 7 dygn -270 st/ paket -Lagervara, men ingen hyllvara, kan beställas med "fritt text", pris: ca. 0,17€/st	 Bild: Curos Stopper desinficerande kork
PosiFlush förfylld färdig NaCl 0.9% (9mg/ml) spolningsspruta -Avsedd för spolning av intravenösa katetrar (ej för annat bruk) -Sprutdiametern och flushtryck samma i alla sprutor -> skadar inte katetern eller venen -Luerlock -Två olika storlekar 5 ml ja 10 ml -30 st/ paket -Apoteksvara: 5ml 306574 och 10 ml 306575, pris: n.0,25 €/st	 Bild: Förfylld färdig PosiFlush –spruta
Fixering av kanylen (förband) -Viktigt, att förbandets material tillåter att observera kanylens insticksstället, fäster kanylen/ katetern ordentligt och låter huden andas. -Fixeringsförband finns i olika modeller -Tegaderm CHG (klorihexidylglukonat- förband är riktad åt intensivvårdspatienter samt infektiösa patienter) -Lagervaror, beställs via Fiori -lagervara-program	 Bild: Vanligt fixeringsförband samt Tegaderm CHG
Viitteen/Lisätiedot: kanylkork, spolning, desinfektion	
Österbottens välfärdsområde • www.osterbottensvalfard.fi • Växel 06 218 1111 Denna anvisning är avsedd för professionella inom vårdbranschen.	